

0,025M Calciumchlorid-Lösung für Koagulationsbestimmungen

Artikel-Nr.: coag113 Inhalt: 12 x 16 ml

Artikel-Nr.: coag114 Inhalt: 12 x 4 ml

DIMDI-Reg.-Nr.: DE/CA22/1116-158-IVD

Produktname

Coag-o-test CaCl₂

Verwendungszweck

(Nur für den In Vitro diagnostischen Gebrauch)

Coag-o-test CaCl₂ ist ein Reagenz für Gerinnungstests wie die APTT-Bestimmung

Zusammenfassung und Hintergrundinformation

Coag-o-test CaCl₂ ist ein notwendiges Reagenz bei der APTT-Bestimmung, welcher ein allgemeiner Screening-Test der intrinsischen Gerinnung (Faktoren: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I) ist.

Aktive Bestandteile

Coag-o-test CaCl₂ ist eine 0,025M gepufferte Lösung mit einem Stabilisator.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Lösungsmittel enthält Natriumazid. Dieses kann metallische Azide bilden, die in Metallrohren potentiell explosiv sein können. Beachten Sie hierzu die Vorsichtsmaßnahmen!
- Proben und alle Geräte die mit diesen in Kontakt kommen, sollten als potentiell infektiös behandelt und sorgfältig entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Reagenz nicht nach dem auch dem Aufkleber angegebenen Verfallsdatum.
- Vermeiden Sie eine mikrobielle Kontamination des Reagenz, die zu fehlerhaften Ergebnissen führen kann.
- Alle Reagenzien, Abfälle und Einwegartikel die im Labor benutzt wurde sollten als gefährlicher Abfall betrachtet werden. Ihre Behandlung und Entsorgung sollte entsprechend der gültigen Bestimmungen für gefährliches Material erfolgen.

Vorbereitung

Die Coag-o-test CaCl₂ Lösung ist gebrauchsfertig.

Gebrauchsanleitung

Befolgen Sie die Anleitungen, die auf dem Beipackzettel des APTT Tests bzw. Reagenz angegeben sind.

Lagerung und Stabilität

Coag-o-test CaCl₂ ist bei 2-8°C im geschlossenen Fläschchen bis zu dem auf dem Aufkleber angegebenen Verfallsdatum stabil. Nach dem Öffnen







beträgt die Stabilität im Originalfläschchen: einen Tag bei 37°C, drei Tage bei 16°C und sieben Tage bei 2-8°C. Frieren Sie Coag-o-test CaCl₂ nicht ein!

Beschränkungen

Personen die das Reagenz verwenden müssen ausgebildete Laborkräfte sein.

Erforderliches aber nicht beiliegendes Material

Coag-o-test CaCl₂ wird für den folgenden Gerinnungs-Screening-Test empfohlen: APTT (Coag-o-test PTT, coag106 und coag107 sowie Coag-o-test PTT Liquid, coag108 und coag109)

	Hersteller		Chargenbezeichnung
	Nur für In-Vitro diagnostische Zwecke		Verwendbar bis
	Gebrauchsanweisung beachten		Lagertemperatur



BGT BioGenTechnologies GmbH
 Von-Langen-Weg 10
 48565 Steinfurt
 e-mail: info@biogentechnologies.de
 web: www.biogentechnologies.de
 Te.: 02551/4090 Fax: 02551/1298

Chargen-B:	Verwendbar bis:
990204	2011-02